

Mode d'emploi pour la literie

Il existe une gamme de draps et de taies d'oreiller Parafriicta® pour une utilisation dans différents contextes. Veuillez utiliser ce mode d'emploi pour sélectionner le produit le plus approprié.

Les draps et taies d'oreiller Parafriicta® sont des produits réutilisables destinés à protéger les peaux fragiles (brûlures traitées, risque d'escarres, épidermolyse bulleuse et autres affections cutanées fragiles) contre les dommages causés par la friction et le cisaillement associé, seuls ou en combinaison avec des équipements de redistribution de pression.

Les ulcères de pression (blessures de pression/ « escarres ») peuvent avoir des conséquences graves, voire mortelles, s'ils ne sont pas traités. **Demandez toujours conseil à un professionnel de la santé qualifié si vous pensez que vous, ou une personne dont vous vous occupez, avez une escarre.**

Certains de ces draps sont destinés à aider les utilisateurs à mobilité réduite, par exemple en raison d'affections neurodégénératives et arthritiques, à se glisser dans le lit et à se tourner lorsqu'ils sont au lit (auto-repositionnement).

Mode d'emploi

Choisir le meilleur drap à utiliser tenez compte de cinq facteurs :

1. la raison de l'utilisation du drap (a) protection de la peau (b) aide au repositionnement
2. le type de cadre de lit, c'est-à-dire plat ou basculant/profilé.
3. le type de matelas, c'est-à-dire standard, à redistribution de pression statique ou à décharge de pression dynamique
4. la taille du matelas (a) simple (b) double
5. Déterminez s'il est important que l'article soit plus facilement distinguable du linge de lit normal (par exemple, blanc ou bleu).

Choisir le meilleur drap à utiliser

Consultez le tableau ci-dessous

Description produit	Code Produit	Utilisation	Type de lit ou de matelas	Couleur
Drap-housse simple	PFSS-001/B	Protection de la peau	Uniquement pour lit plat, matelas standard ou matelas statique et anti-pression	Blanc ou bleu
Drap plat simple (dynamique)	PFSS-002	Protection de la peau	Lit plat ou incliné, dynamique, matelas anti-pression	Blanc
Drap plat simple	PFSS-003/B	Protection de la peau	Lit plat ou incliné, matelas standard ou statique, matelas anti-pression	Blanc ou bleu
Drap semi-ajusté simple (aide à la mobilité)	PFMAS-001/B	Auto-repositionnement	Lit plat ou incliné, matelas standard ou statique anti-pression	Blanc ou bleu
Double, drap plat (double usage)	PFDS-001	Auto-repositionnement ou protection de la peau	Lit plat ou incliné, matelas standard ou statique anti-pression	Blanc
Taie d'oreiller	PFPC-001/B	Protection de la peau	Oreiller rectangulaire	Blanc ou bleu


Assurez-vous que le drap ou la taie d'oreiller s'adapte au matelas ou à l'oreiller.

Consultez le tableau ci-dessous

Description produit	Code Produit	Taille du matelas ou de l'oreiller	Dimensions
Drap-housse simple	PFSS-001	190cm x 90cm	Ajusté. Panneau de tissu Parafricta® 74cm x 174cm
Drap plat simple (dynamique)	PFSS-002	180-200cm x 90-100cm	160cm x 274cm Panneau de tissu Parafricta® 74cm x 174cm
Drap plat simple	PFSS-003	180-200cm x 90-100cm	172cm x 292cm Panneau de tissu Parafricta® 74cm x 174cm
Drap semi-ajusté simple (aide à la mobilité)	PFMAS-001	190cm x 90cm	Ajusté à l'extrémité supérieure. Panneau central en tissu Parafricta® 65cm x 132cm
Double, drap plat (double usage)	PFDS-001	180-200cm x 130-140cm	250cm x 300cm Panneau de tissu Parafricta® 100cm x 120cm
Taie d'oreiller	PFPC-001	Oreiller rectangulaire	48cm x 71cm

Autres instructions

- La literie doit être changée lorsqu'elle est sale ou selon l'avis clinique (comme le linge de lit normal).
- Une protection absorbante peut être utilisée sous le drap pour évacuer l'urine, l'exsudat de la plaie, la sueur ou la salive, si nécessaire.
- Le drap plat simple pour les matelas dynamiques doit reposer sur le matelas et ne pas être bordé de façon serrée.
- La taie d'oreiller doit avoir le tissu à faible friction Parafricta® sur le dessus.
- L'étiquette tissée Parafricta® sur le drap indique le côté supérieur et l'extrémité supérieure.
- Pour tous les draps, le panneau Parafricta® doit être situé sous le torse de l'utilisateur.
- Lorsque les draps sont utilisés pour protéger la peau, les talons doivent reposer sur le panneau Parafricta®.
- Lorsque les draps sont utilisés pour faciliter l'auto-repositionnement, les talons doivent reposer sur le poly coton.
- Jetez les draps s'ils sont très sales et ne peuvent pas être lavés ou si le tissu Parafricta® ou les coutures sont endommagés.

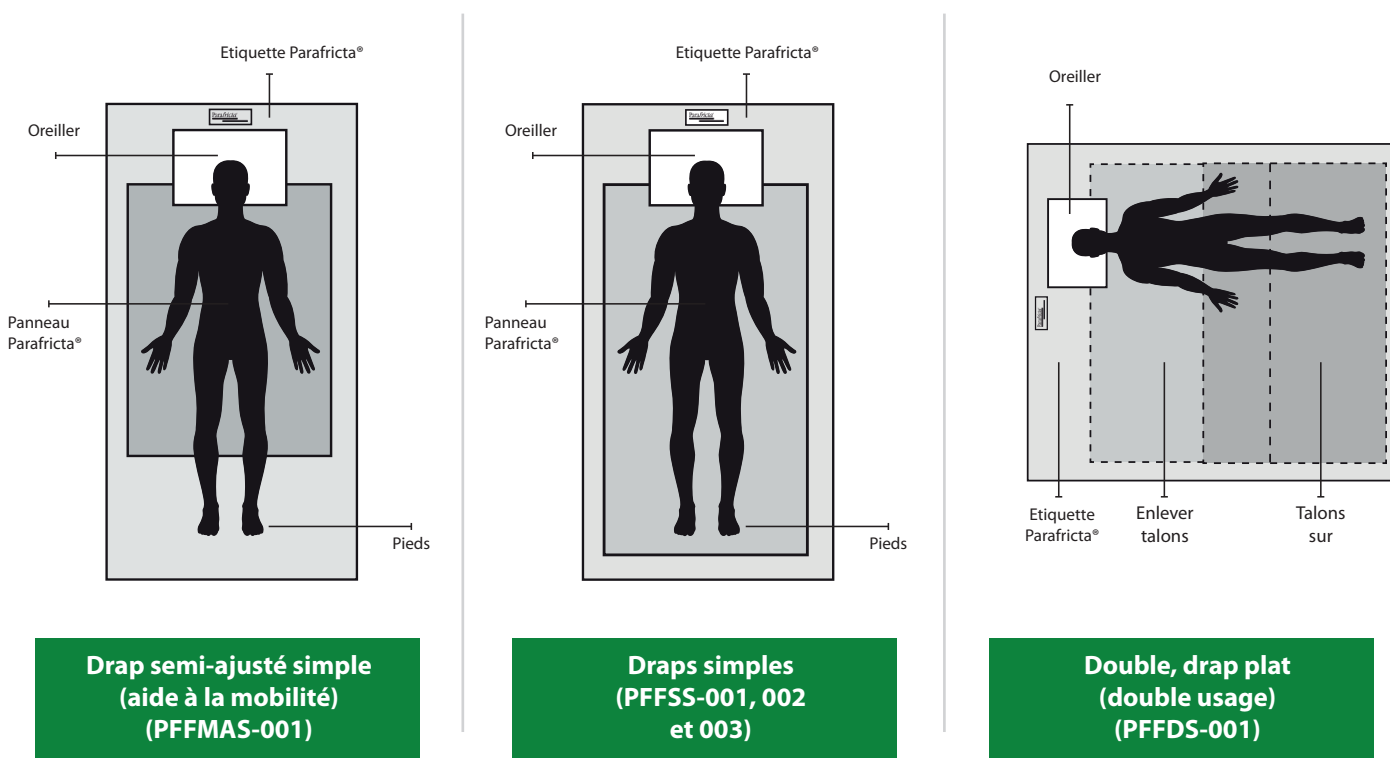

Précautions

- Le drap d'aide à la mobilité ne soulage pas les talons de la friction et du cisaillement associé. Si nécessaire, des chaussettes Parafricta® doivent également être utilisées.















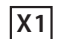

Instructions de lavage

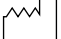- Les draps Parafricta® doivent être lavés avec un cycle chaud (60°C) synthétique dans une machine à laver domestique, ou avec un cycle de 95°C si une désinfection maximale est requise.
- Sécher sur la corde (à l'air libre) ou au sèche-linge avec un cycle synthétique à basse température.
- Dans une blanchisserie professionnelle, les draps peuvent être lavés avec un cycle à 70°C pendant un maximum de 10 minutes ou à un cycle de 95°C si une désinfection maximale est requise.
- Repasser à basse température si nécessaire.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel domestique ou au chlore.
- Ne pas nettoyer à sec.

Références

Voir www.parafricta.com 'Publications' et 'Ressources éducatives'

Glossaire des symboles utilisés sur les notices d'emballage

 Numéro catalogue	 Ne pas nettoyer à sec
 Lot de 1	 Identificateur unique du dispositif
 Consultez le mode d'emploi électronique	 Code du lot
 Site web d'informations pour les patients	 Date de fabrication
 Température maximale de lavage 60°C	 Date limite d'utilisation
 Seule l'eau de Javel à l'oxygène/non chlorée est autorisée	 Dispositif médical
 Séchage au sèche-linge possible - séchage à basse température - température maximale d'évacuation 60°C	 Conforme à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux
 Repasser à une température maximale de la semelle du fer de 110°C	 Conforme à la directive britannique sur les dispositifs médicaux

Fabriqué par



APA Parafricta Ltd

30 Upper High Street, Thame, OX9 3EZ, Royaume-Uni

Tel +44 1869 226566

info@parafricta.com

www.parafricta.com

APA Parafricta® Ltd est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré auprès de la MHRA du Royaume-Uni. La société est également enregistrée dans la base de données EUDAMED de l'UE pour les fabricants de dispositifs médicaux.

Teneur en fibres de la literie

Panneau à faible friction/côté : 100% Nylon

Entourage/dossier : 60% Polyester 40% Coton

Ne contient pas de latex



Représentant agréé dans l'Union européenne

EC REP

European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd

Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC, IRLANDE

info@europeandevicesolutions.eu

Importateur



Hospidex nv

Grijpenlaan 23, 3300 Tienen, BELGIQUE

info@hospidex.eu