

Mode d'emploi pour les chaussettes

Il existe deux modèles de chaussettes réutilisables Parafri^{ct}a[®].



A enfiler



Fermeture Velcro[®]

Les chaussettes en tissu à faible friction Parafri^{ct}a[®] sont des produits réutilisables destinés à aider à la prévention ou à la guérison des escarres, seuls ou en combinaison avec des pansements ou des équipements de redistribution de la pression.

Les ulcères de pression (blessures de pression/ » escarres ») peuvent avoir des conséquences graves, voire mortelles, si elles ne sont pas traitées. **Demandez toujours conseil à un professionnel de la santé qualifié si vous pensez que vous, ou une personne dont vous avez la charge, avez une escarre.**

Mode d'emploi

- Conçue pour être portée au lit, ou en position assise, pour protéger la peau des pieds, en particulier les talons.
- Peut être utilisée en combinaison avec des dispositifs de redistribution de la pression appropriés (par exemple, matelas, coussin ou cale).
- Sélectionnez une taille qui vous va confortablement selon le tableau de sélection des tailles.
- S'il est difficile pour l'utilisateur d'enfiler ou d'enlever une chaussette à enfiler, s'il faut protéger l'os de la cheville ou s'il y a un

Mode d'emploi (a continué)



risque de gonflement de la cheville, envisagez d'utiliser une chaussette à fermeture Velcro® de Parafricta®.

- Si vous utilisez une chaussette à fermeture Velcro®, desserrez les sangles pour permettre au pied de glisser dans la chaussette et fixez-le fermement mais sans serrer avec le Velcro.
- Des chaussettes ou des bas ne doivent pas être portés à l'intérieur des chaussettes, à l'exception des bas anti-embolie ou de compression prescrits par un médecin.
- Les chaussettes sont dotées d'une semelle antidérapante qui permet aux utilisateurs de passer du lit au fauteuil en toute sécurité.
- Peut être utilisée sur les pansements pour aider à retenir les pansements en empêchant le déplacement causé par la friction (glissement).
- Changez pour une chaussette propre en cas de salissure ou selon l'avis clinique.
- Les chaussettes doivent être éliminées en cas de salissures importantes qui ne peuvent être éliminées par le lavage ou en cas de signes de rupture des coutures ou de dommages au tissu de la doublure à faible frottement.

Choisir sa taille



Mesurez depuis l'extrémité de l'orteil le plus long jusqu'à l'arrière du talon.
Si vous ne savez pas laquelle des deux tailles choisir, choisissez la plus grande.

Modèle de chaussette	Taille produit	Pointure	Orteil au talon (Max)	Code produit
 PFFB-002 Chaussette à enfiler (À l'unité)	XS	34-36	24cm	PFFB-002XS
	S	36.5-39	26cm	PFFB-002S
	M	39.5-41.5	28cm	PFFB-002M
	L	42-45.5	30cm	PFFB-002L
	XL	46-48	32cm	PFFB-002XL
 PFFB-001 Fermeture Velcro® (À l'unité)	XS	34-36	24cm	PFFB-001XS
	S	36.5-39	26cm	PFFB-001S
	M	39.5-41.5	28cm	PFFB-001M
	L	42-45.5	30cm	PFFB-001L
	XL	46-48	32cm	PFFB-001XL

Quand les utiliser

Les chaussettes Parafricta® fonctionnent en soulageant **la friction et le cisaillement** associé.

Envisagez l'utilisation pour les patients dans les conditions suivantes (exemples):

- Lorsqu'il existe des signes précoces de dégradation de la peau, par exemple un érythème non blanchissant, des abrasions, une forte humidité sous-épidermique.
 - Lorsque les patients sont difficiles à repositionner sans traîner les talons sur la surface d'appui.
 - Lorsque les patients utilisent fréquemment leurs talons pour se pousser vers le haut du lit.
 - Lorsque les affections des patients entraînent des mouvements répétitifs ou une agitation chroniques.
 - Lorsque le pansement recouvrant une escarre existante est fréquemment déplacé.
 - Lorsqu'il existe une cause particulière de risque très élevé (par exemple, chez les diabétiques ou en fin de vie).
-

Précautions

- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes non pansées.
 - Veiller à ce qu'une décharge complète de la pression soit utilisée lorsqu'elle est indiquée, en particulier en cas de suspicion de lésion des tissus profonds.
-

Instructions de lavage

- Les chaussettes Parafricta® doivent être lavées dans une machine à laver domestique avec une charge légère, à chaud (60°C), cycle synthétique.
- Dans une blanchisserie professionnelle, les chaussettes peuvent être lavées à 70°C pendant 10 minutes (cycle de désinfection).
- Les fermetures Velcro® doivent être fermées pendant le lavage.
- Les articles très sales peuvent être trempés au préalable dans un produit détachant oxydant (pas d'eau de Javel domestique/ au chlore).
- Séchage à l'air libre
- Ne pas repasser
- Ne pas laver à sec















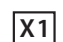

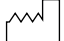Références

Voir www.parafricta.com 'Publications' et 'Ressources éducatives'

Guide NICE - Chaussettes et sous-vêtements Parafricta® pour réduire les lésions cutanées chez les personnes présentant ou risquant de présenter des escarres - 19 mai 2021

www.nice.org.uk/guidance/mtg20

Glossaire des symboles utilisés sur les notices d'emballage

 REF	Numéro catalogue	 UDI	Identificateur unique du dispositif
 X1	Lot de 1	 LOT	Code du lot
	Consultez le mode d'emploi électronique		Date de fabrication
	Site web d'informations pour les patients		Date limite d'utilisation
	Température maximale de lavage 60°C - programme doux	 MD	Dispositif médical
	Seule l'eau de Javel à l'oxygène/non chlorée est autorisée		Conforme à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux
	Séchage à l'air libre		Conforme à la directive britannique sur les dispositifs médicaux
	Ne pas repasser		
	Ne pas nettoyer à sec		

Fabriqué par



APA Parafricta Ltd

30 Upper High Street, Thame, OX9 3EZ, Royaume-Uni

Tel +44 1869 226566

info@parafricta.com

www.parafricta.com

APA Parafricta® Ltd est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré auprès de la MHRA du Royaume-Uni. La société est également enregistrée dans la base de données EUDAMED de l'UE pour les fabricants de dispositifs médicaux.

Teneur en fibres des chaussettes

PFFB-001 Fermeture Velcro®

Corps/doublure : 100% nylon

Filet d'orteil : 100% polyester

Bordure de cheville : 80% nylon, 20% élasthanne

Ne contient pas de latex



PFFB-002 A enfiler

Corps/doublure : 100% nylon

Filet d'orteil : 100% polyester

Bordure de cheville : 97% coton, 3% élasthanne

Ne contient pas de latex



Représentant agréé dans l'Union européenne



European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd

Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC, IRLANDE

info@europeandevicesolutions.eu

Importateur



Hospidex nv

Grijpenlaan 23, 3300 Tienen, BELGIQUE

info@hospidex.eu