

Gebrauchsanleitung für Bettwäsche

Hier ist eine Reihe von Parafri^{ct}a®-Bettlaken und Kissenbezügen für den Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen. Mit dieser Anleitung können Sie das am besten geeignete Produkt wählen.

Bettlaken und Kissenbezüge von Parafri^{ct}a® sind wiederverwendbare Produkte, die zum Schutz empfindlicher Haut (z. B. bei behandelten Brandwunden, Gefahr von Druckgeschwüren, Epidermolysis bullosa und anderen Hautleiden) vor Schäden durch Reibung und der damit verbundenen Scherung bestimmt sind.

Druckgeschwüre (Dekubitus/"Wundliegen") können unbehandelt zu schweren und sogar lebensbedrohlichen gesundheitlichen Folgen führen. **Lassen Sie sich immer von qualifiziertem medizinischen Fachpersonal beraten, wenn Sie glauben, dass Sie oder eine von Ihnen betreute Person ein Druckgeschwür hat.**

Einige der Laken sollen Benutzern mit Mobilitätseinschränkungen, beispielsweise durch neurodegenerative und arthritische Leiden, das Gleiten ins und aus dem Bett und das Umdrehen (eigenständiges Umlagern) erleichtern.

Gebrauchsanleitung

Wahl des am besten geeigneten Bettlakens. Bedenken Sie vier Faktoren:

1. Den Grund für die Verwendung des Lakens (a) Schutz der Haut (b) Hilfe bei der Umlagerung
2. Die Art des Bettgestells, z. B. flach oder geneigt/profiliert
3. Die Art der Matratze, z. B. regulär, statisch druckreduzierend oder dynamisch druckreduzierend
4. Die Größe der Matratze (a) Normal- (b) Doppel-/Kingsize-Matratze
5. Überlegen Sie, ob es wichtig ist, dass sich das Produkt leichter von normaler Bettwäsche unterscheidet (d. h. weiß oder blau).

Wahl des am besten geeigneten Bettlakens

Beachten Sie dazu folgende Tabelle

Produktbeschreibung	Produkt-Code	Einsatzzweck	Art von Bett/Matratze	Farbe
Einfaches Spannbettlaken	PFFSS-001/B	Haut-schutz	Nur für flache Betten, reguläre oder statische druckreduzierende Matratzen	Weiß oder blau
Einfaches flaches Bettlaken (dynamisch)	PFFSS-002	Haut-schutz	Flaches oder geneigtes Bett, dynamische, druckreduzierende Matratze	Weiß
Einfaches Bettlaken	PFFSS-003/B	Haut-schutz	Flaches oder geneigtes Bett, reguläre Matratze oder statische druckreduzierende Matratze	Weiß oder blau
Einfaches, Halbspannlaken Mobilität-assist Blatte	PFMAS-001/B	Eigen-ständige Umlagerung	Flaches oder geneigtes Bett, reguläre oder statische druckreduzierende Matratze	Weiß oder blau
Doppeltes flaches Bettlaken (doppelter Verwendungszweck)	PFDDS-001	Eigenständige Umlagerung oder Hautschutz	Flaches oder geneigtes Bett, reguläre oder statische druckreduzierende Matratze	Weiß
Kissenbezug	PFFPC-001/B	Haut-schutz	Rechteckiges Kissen, britische Größe	Weiß oder blau


Sorgen Sie dafür, dass das Laken oder der Kissenbezug für die Matratze bzw. das Kissen passt

Beachten Sie dazu folgende Tabelle

Produktbeschreibung	Produkt-Code	Größe der Matratze/ des Kissens	Maße
Einfaches Spannbettlaken	PFFSS-001	190cm x 90cm	Spannbettlaken. Parafricta® Stoffbahn 74 cm x 174 cm
Einfaches flaches Bettlaken (dynamisch)	PFFSS-002	180-200cm x 90-100cm	160 cm x 274 cm Parafricta® Stoffbahn 74 cm x 174 cm
Einfaches flaches Bettlaken	PFFSS-003	180-200cm x 90-100cm	172 cm x 292 cm Parafricta® Stoffbahn 74 cm x 174 cm
Einfaches, Halbspannlaken Mobilität-assist Blatte	PFFMAS-001	190cm x 90cm	Gummizug am oberen Ende. Parafricta® Stoffbahn in der Mitte 65 cm x 132 cm
Doppeltes flaches Bettlaken (doppelter Verwendungszweck)	PFFDS-001	180-200cm x 130-140cm	250 cm x 300 cm Parafricta® Stoffbahn 100 cm x 120 cm
Kissenbezug	PFFPC-001	Rechteckiges Kissen, britische Größe	48 cm x 71 cm

Weitere Tipps

- Die Laken sollten gewechselt werden, wenn sie schmutzig sind oder wie dies klinisch erforderlich erscheint (wie auch bei normaler Bettwäsche).
- Bei Bedarf kann unter dem Laken eine saugfähige Unterlage verwendet werden, um Harn, Wundflüssigkeit, Schweiß oder Speichel aufzusaugen.
- Das einfache flache Spannbettlaken für dynamische Matratzen sollte auf der Matratze liegen und nicht darunter festgesteckt werden.
- Der Kissenbezug sollte mit der reibungsarmen Parafricta®-Seite nach oben verwendet werden.
- Das Parafricta®-Webetikett am oberen Ende des Lakens weist auf die Oberseite hin.
- Die Parafricta®-Stoffbahn sollte bei allen Laken unter dem Rumpf des Patienten liegen.
- Wenn die Laken zum Hautschutz verwendet werden, sollten die Fersen des Patienten auf der Parafricta®-Stoffbahn liegen.
- Werden die Laken zur Unterstützung bei der eigenständigen Umlagerung verwendet, sollten die Fersen auf dem Baumwoll-Polyestergemisch liegen.
- Bei starker Verschmutzung, die sich durch Waschen nicht entfernen lässt, oder bei Beschädigung der Parafricta®-Stoffbahn oder der sie umgebenden Nähte sollte das Laken entsorgt werden.

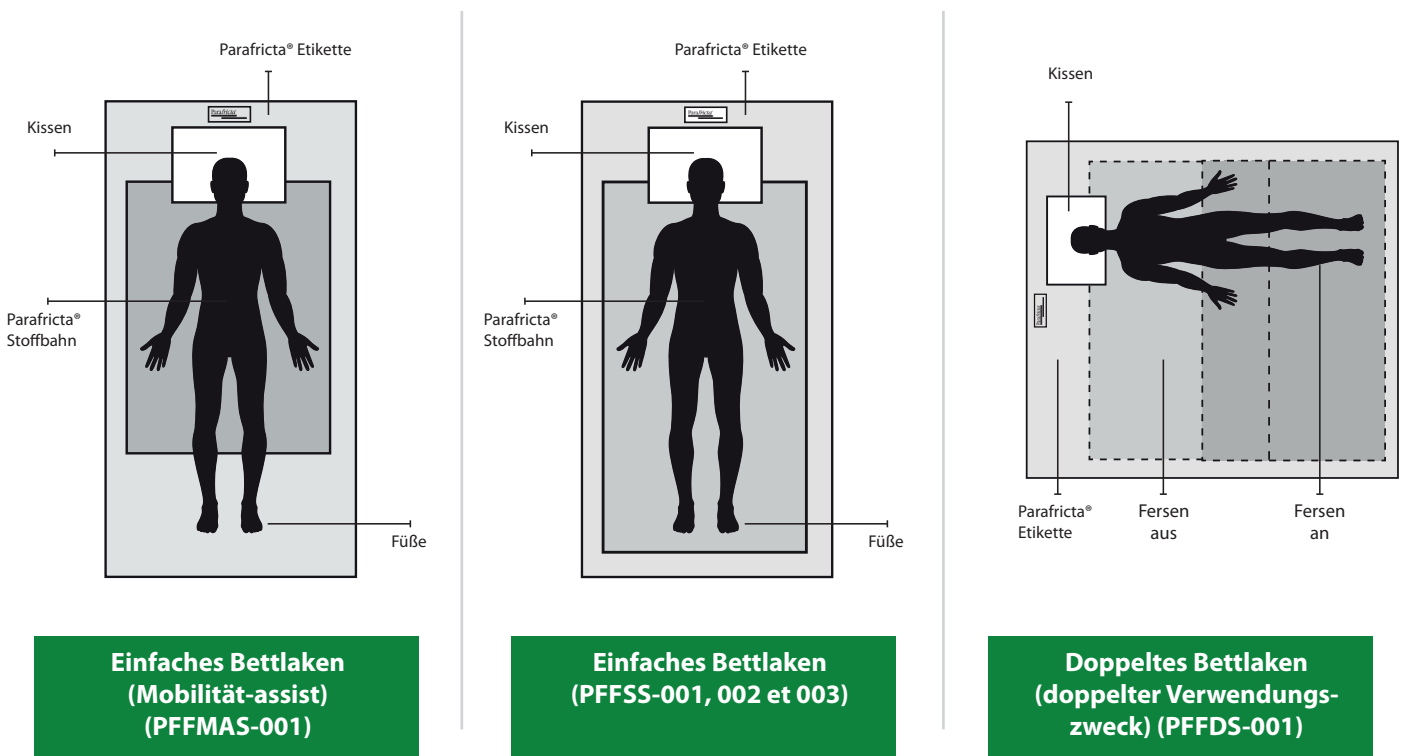

Vorsichtsmaßnahmen

- Das mobilitätsfördernde Laken bewirkt keine Reduzierung von Reibung oder Scherung an den Fersen. Bei Bedarf sollten hier zusätzlich Parafricta®-Sockenschuhe verwendet werden.













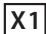



Waschanleitung

- Parafricta®-Laken sollten in häuslichen Waschmaschinen in einem heißen (60°C) Kunstfaserwaschgang oder mit 95°C gewaschen werden, falls maximale Sanitisierung erforderlich ist.
- Zum Trocknen (an der Luft) aufhängen oder im Trockner auf niedriger Einstellung für Kunstfasern trocknen.
- In einer professionellen Wäscherei können die Laken in einem Waschgang gewaschen werden, der für bis zu 10 Minuten 70°C erreicht, oder bei 95°C, falls eine maximale Sanitisierung erforderlich ist.
- Bei Bedarf mit niedriger Temperatur bügeln.
- Kein Haushalts-/Chlorbleichmittel verwenden.
- Nicht chemisch reinigen

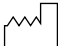Referenzen

Siehe www.parafricta.com 'Publications' and 'Educational Resources'

Glossar der auf Packungsbeilagen verwendeten Symbole

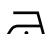 REF	Katalognummer		Nicht chemisch reinigen
 X1	Einzelpackung	 UDI	Eindeutige Geräteerkennung
	Die elektronische Gebrauchsanweisung durchlesen	 LOT	Batch-Code
	Website für Patienteninformationen		Herstellungsdatum
	Maximale Waschtemperatur 60°C		Haltbarkeitsdatum
	Nur Sauerstoff / chlorfreies Bleichmittel erlaubt	 MD	Medizinisches Gerät
	Trocknung im Wäschetrockner möglich - bei niedrigeren Temperaturen trocknen - maximale Ablufttemperatur 60 °C		Entspricht den EU-Richtlinien für Medizinprodukte
	Bei maximaler Eisentemperatur von 110°C bügeln		Entspricht der britischen Richtlinie für Medizinprodukte

Hergestellt von



APA Parafricta Ltd

30 Upper High Street, Thame, OX9 3EZ, UK

Tel +44 1869 226566

info@parafricta.com

www.parafricta.com

APA Parafricta® Ltd ist ein eingetragener Gerätehersteller bei der britischen MHRA. Das Unternehmen ist auch auf der EUDAMED-Datenbank für Medizingerätehersteller der EU eingetragen.

Fasergehalt der Bettwäsche

Reibungsarme Stoffbahn/Seite: 100% Nylon

Einfassung/Rückseite: 60% Polyester, 40% Baumwolle

Latexfrei



Bevollmächtigter EU-Vertreter

EC REP

European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd

Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC, IRLAND

info@europeandevicesolutions.eu

Importeur



Hospidex nv

Grijpenlaan 23, 3300 Tienen, BELGIEN

info@hospidex.eu