

# Bedienungsanleitung für Sockenschuhe

## Es gibt zwei Modelle der Parafri<sup>ct</sup>a<sup>®</sup> -Sockenschuhe



**Slipper**



**Velcro<sup>®</sup>-Verschluss**

Parafri<sup>ct</sup>a<sup>®</sup> reibungsarme Stoff-Sockenschuhe sind wiederverwendbare Produkte zur Prävention oder Heilung von Druckgeschwüren, entweder allein oder in Kombination mit Wundverbänden oder Produkten zur Druckentlastung.

Druckgeschwüre ("Dekubitus") können unbehandelt zu schwerwiegenden und sogar lebensbedrohlichen gesundheitlichen Folgen führen. **Lassen Sie sich immer von einem qualifizierten medizinischen Fachpersonal beraten, wenn Sie glauben, dass Sie oder eine von Ihnen betreute Person ein Dekubitus hat.**

## Gebrauchsanleitungen

- Zum Tragen im Bett konzipiert oder beim Sitzen zum Schutz der Haut an den Füßen, insbesondere den Fersen.
- Kann zusammen mit passenden Druckentlastungsprodukten verwendet werden (z. B. Matratze, Kissen oder Keil).
- Aus der Größentabelle bequeme Größe auswählen.
- Wenn der Anwender Schwierigkeiten beim An- oder Ausziehen der Slipper-Sockenschuhe hat, Schutz über dem Knöchel erforderlich ist oder das Risiko für Knöchelschwellung besteht, erwägen Sie die Verwendung eines Parafri<sup>ct</sup>a Velcro Sockenschuhs.



## Gebrauchsanleitungen (Fortsetzung)

- Bei der Verwendung des Sockenschuhs mit Velcro®-Verschluss die Riemen lockern, damit der Fuß in den Sockenschuh gleiten kann, und mit dem Velcro-Verschluss fest, aber nicht zu eng verschließen.
- Keine Socken oder Strümpfe in den Sockenschuhen tragen, außer von einem Arzt verordnete antiembolische Strümpfe bzw. Kompressionsstrümpfe.
- Die Sockenschuhe sind mit einer Antirutsch-Sohle ausgestattet, damit der Träger sicher vom Bett in den Stuhl wechseln kann.
- Kann über Verbänden getragen werden, damit Wundverbände durch Vermeidung eines Verrutschens (Hochrutschens) durch Reibung am Platz gehalten werden.
- Bei Verschmutzung oder nach klinischem Ermessen in einen sauberen Sockenschuh wechseln.
- Die Sockenschuhe sollten bei starker Verschmutzung, die nach dem Waschen nicht entfernt wurde oder bei Zeichen von Saum-Defekten oder Beschädigungen am reibungsarmen Futterstoff, entsorgt werden

## Größentabelle



Messen Sie von der Spitze des längsten Zehs bis zur Fersenrückseite. Falls unsicher bei der Auswahl zwischen zwei Größen, wählen Sie die größere Option.

Sockenschuhe-Modell	Produkt-größe	Schuhgröße EU	Zeh bis Ferse (Max)	Produkt- Code
 <p><b>PFFB-002</b> Slipper (einzeln verpackt)</p>	XS	34-36	24cm	PFFB-002XS
	S	36.5-39	26cm	PFFB-002S
	M	39.5-41.5	28cm	PFFB-002M
	L	42-45.5	30cm	PFFB-002L
	XL	46-48	32cm	PFFB-002XL
 <p><b>PFFB-001</b> Velcro®- Verschluss (einzeln verpackt)</p>	XS	34-36	24cm	PFFB-001XS
	S	36.5-39	26cm	PFFB-001S
	M	39.5-41.5	28cm	PFFB-001M
	L	42-45.5	30cm	PFFB-001L
	XL	46-48	32cm	PFFB-001XL

## Zeitpunkt der Verwendung

Parafricta-Sockenschuhe wirken durch Entlastung von **Reibung** und damit verbundener **Scherung**.

Ziehen Sie die Anwendung bei Patienten unter den folgenden Bedingungen in Betracht (Beispiele):

- Frühe Anzeichen von Hautdefekten, z. B. nicht blanchierendes Erythem; Abrasionen; hohe subepidermale Feuchtigkeit
  - Wenn eine Umlagerung des Patienten ohne Schleifen der Fersen auf der Tragfläche schwierig ist
  - Wenn Patienten häufig ihre Fersen benutzen, um sich im Bett hochzuschieben
  - Wenn der Zustand der Patienten zu chronischen repetitiven Bewegungen oder Ruhelosigkeit führt
  - Wenn der Verband über einem bestehenden Druckgeschwür oft verrutscht
  - Bei Vorliegen einer besonderen Ursache mit sehr hohem Risiko (z. B. bei Diabetikern oder am Lebensende)
- 

## Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht auf unbedeckten, offenen Wunden anwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass (auch) eine vollständige Druckentlastung verwendet wird, wo dies angezeigt ist, insbesondere bei oder Verdacht auf eine tiefe Gewebeverletzung.
- 

## Waschanleitungen

- Die Parafricta®-Sockenschuhe sollten im synthetischen Warmwaschgang (60 °C) mit geringer Füllmenge in der häuslichen Waschmaschine gewaschen werden.
- In einer professionellen Reinigung können die Sockenschuhe auch in einem Waschgang mit 70 °C für 10 Minuten (Desinfektionswaschgang) gewaschen werden.
- Die Velcro®-Verschlüsse sollten beim Waschen geschlossen sein.
- Stark verschmutzte Artikel können in einem firmeneigenen Oxidationsfleckenentferner (kein häusliches Bleichmittel/Chlorbleiche) eingeweicht werden.
- Zum Trocknen (an der Luft) aufhängen.
- Nicht bügeln.
- Keine Trockenreinigung.

## Referenzen

Siehe [www.parafricta.com](http://www.parafricta.com) ,Publications (Herausgaben) und ,Educational Resources (Bildungsressourcen)

NICE Guidance - Parafricta Bootees and Undergarments to reduce skin breakdown in people with or at risk of pressure ulcers - 19 May 2021

[www.nice.org.uk/guidance/mtg20](http://www.nice.org.uk/guidance/mtg20)

---


## Glossar der auf Packungsbeilagen verwendeten Symbole

 Katalognummer

 Packung mit 1

 Die elektronische Gebrauchsanweisung durchlesen

 Website für Patienteninformationen

 Maximale Waschtemperatur 60°C – Schonwaschgang

 Nur Sauerstoff / chlorfreies Bleichmittel erlaubt

 Leinentrocknung

 Nicht bügeln


 Nicht chemisch reinigen


 Eindeutige Geräteerkennung


 Batch-Code

 Herstellungsdatum

 Haltbarkeitsdatum

 Medizinisches Gerät

 Entspricht den EU-Richtlinien für Medizinprodukte

 Entspricht der britischen Richtlinie für Medizinprodukte

---

## Hergestellt von



**APA Parafricta Ltd**

30 Upper High Street, Thame, OX9 3EZ, UK

Tel +44 1869 226566

[info@parafricta.com](mailto:info@parafricta.com)

[www.parafricta.com](http://www.parafricta.com)

APA Parafricta® Ltd ist ein eingetragener Gerätehersteller bei der britischen MHRA. Das Unternehmen ist auch auf der EUDAMED-Datenbank für Medizingerätehersteller der EU eingetragen.

## Fasergehalt von Sockenschuhen

### PFFB-001 Velcro®-Verschluss

Außen/Futter: 100% Nylon

Zehennetz: 100% Polyester

Knöchelbesatz: 80% Nylon 20% Elasthan

Latexfrei



### PFFB-002 Slipper Modell

Außen/Futter: 100% Nylon

Zehennetz: 100% Polyester

Knöchelmanschette: 97% Baumwolle, 3% Elasthan

Latexfrei



---

## Bevollmächtigter EU-Vertreter



### European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd

Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC, IRLANDE

info@europeandevicesolutions.eu

---

## Importeur



### Hospidex nv

Grijpenlaan 23, 3300 Tienen, BELGIQUE

info@hospidex.eu