

Gebrauchsanleitung für Unterwäsche

Die Parafri^{ct}a®-Unterwäsche gibt es in drei Varianten



Mit Velcro®-
Verschluss



“Pull-on”-
Slip stil



“Pull-on”
Boxershorts stil

Unterhosen aus reibungsarmem Parafri^{ct}a®-Gewebe sind wiederverwendbare Produkte, die – für sich oder in Verbindung mit Wundverbänden, Inkontinenzeinlagen oder druckreduzierenden Vorrichtungen – bei der Verhinderung oder Heilung von Druckgeschwüren helfen sollen.

Druckgeschwüre (Dekubitus/„Wundliegen“) können unbehandelt zu schweren und sogar lebensbedrohlichen gesundheitlichen Folgen führen. **Lassen Sie sich immer von qualifiziertem medizinischem Fachpersonal beraten, wenn Sie glauben, dass Sie oder eine von Ihnen betreute Person ein Druckgeschwür hat.**

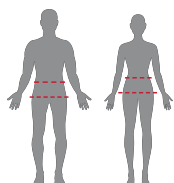
Gebrauchsanleitung

- Zum ständigen Tragen unter Kleidung oder Nachtwäsche zum Schutz der Haut an Kreuzbein, Gesäß und Hüften entwickelt.
- Kann in Kombination mit geeigneten druckreduzierenden Vorrichtungen wie Matratzen, Kissen oder Auflagen verwendet werden
- Nutzen Sie die Größentabelle zur Wahl des geeigneten Modells in der gewünschten Größe




Gebrauchsanleitung (Fortsetzung)

- Falls die Benutzer Schwierigkeiten haben die Modelle zum Schlüpfen an- und auszuziehen, sollten Sie die Verwendung des Modells mit Velcro®-Verschluss in Betracht ziehen, das vorne geöffnet werden kann
- Wechseln Sie die Unterwäsche, wenn sie schmutzig wird oder nach klinischem Urteil
- Kann über Verbänden verwendet werden, um die Fixierung der Wundverbände zu unterstützen, indem ein reibungsbedingtes Verschieben („Hochrutschen“) verhindert wird
- Inkontinenzeinlagen können getragen werden. Empfindliche Haut oder verbundene Wunden sollten jedoch möglichst mit dem Futterstoff der Unterwäsche in Kontakt bleiben. Einlagen können bei Bedarf mit Netzhosen unter der Unterwäsche fixiert werden.
- Bei starker Verschmutzung, die durch Waschen nicht entfernt werden kann, oder bei Zeichen einer Beschädigung der Nähte oder des reibungsarmen Futterstoffs sollte die Unterwäsche entsorgt werden.

Wahl der richtigen Größe



Beachten Sie dazu folgende Tabelle. Um die optimal passende Unterhose zu finden, sind Taillen- wie Hüftmaße erforderlich. Richten Sie sich im Zweifelsfall zunächst nach dem **Hüftumfang** des Patienten.

Produktbeschreibung	Produktgröße	Hüft-umfang (cm)	Taillen-umfang (cm)	Produkt-Code
 <p>PFFUG-001 Slip stil mit Velcro®-Verschluss</p>	XS	86-90	56-65	PFFUG-001XS
	S	91-99	66-80	PFFUG-001S
	M	100-110	81-93	PFFUG-001M
	L	111-120	94-106	PFFUG-001L
	XL	121-130	107-121	PFFUG-001XL
 <p>PFFUG-002 "Pull-on" - Slip stil</p>	XS	86-90	56-65	PFFUG-002XS
	S	91-99	66-80	PFFUG-002S
	M	100-110	81-93	PFFUG-002M
	L	111-120	94-106	PFFUG-002L
	XL	121-130	107-121	PFFB-001XL
 <p>PFFUG-003 "Pull-on"-Boxershorts stil</p>	XS	86-90	56-65	PFFUG-003XS
	S	91-99	66-80	PFFUG-003S
	M	100-110	81-93	PFFUG-003M
	L	111-120	94-106	PFFUG-003L
	XL	121-130	107-121	PFFUG-003XL
	XXL	131-152	122-140	PFFUG-003XXL

Zeitpunkt der Verwendung

Parafricta®-Unterwäsche bietet Linderung von **Reibung** und der damit verbundenen **Scherung**

Ziehen Sie sie für Patienten unter folgenden Umständen in Betracht (Beispiele):

- Bei frühen Anzeichen eines Abbaus der Haut, beispielsweise bei einem Erythem, das sich auf Druck nicht entfärbt; Abschürfungen; starker Unterhautfeuchtigkeit.
- Wenn das Umlagern auf der Unterlage ein Ziehen an der Haut des Patienten auslöst, beispielsweise bei Verwendung eines Rutschbretts vom Bett zum Stuhl.
- Rollstuhlfahrer.
- Wenn der Zustand des Patienten zu chronisch wiederholten Bewegungen oder Ruhelosigkeit führt.
- Wenn der Verband über einem bestehenden Druckgeschwür häufig gewechselt wird.
- Wenn ein besonderer Fall von sehr hohem Risiko vorliegt (beispielsweise bei Diabetes oder am Lebensende).

Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht auf offenen Wunden ohne Verband verwenden.
- Dafür sorgen, dass gegebenenfalls (auch) eine vollständige Druckentlastung bewirkt wird, insbesondere bei Verdacht auf Schädigung tiefer Gewebeschichten (sDTI).

Waschanleitung

- In einer häuslichen Waschmaschine sollte Parafricta®-Unterwäsche in einer leichten Ladung bei einem heißen (60°C) Waschgang für Kunstfasern gewaschen werden.
- In einer professionellen Wäscherei kann die Unterwäsche in einem Waschgang gewaschen werden, der für bis zu 10 Minuten 70°C erreicht.
- Stark verschmutzte Artikel können vorher in einem oxidierenden Marken-Fleckenreiniger eingeweicht werden (nicht in Haushalts-/Chlorbleichmittel).
- An der Leine (Luft) trocknen.
- Nicht bügeln.
- Nicht chemisch reinigen.



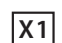


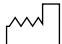










Referenzen

Siehe www.parafricta.com Publications and Educational Resources

NICE Guidance - Parafricta® Bootes and Undergarments to reduce skin breakdown in people with or at risk of pressure ulcers - 19. Mai 2021

www.nice.org.uk/guidance/mtg20

Glossar der auf Packungsbeilagen verwendeten Symbole

 REF	Katalognummer	 UDI	Eindeutige Gerätekennung
 X1	Einzelpackung	 LOT	Batch-Code
 i	Die elektronische Gebrauchsanweisung konsultieren		Herstellungsdatum
 W	Website für Patienteninformationen		Haltbarkeitsdatum
 60	Maximale Waschtemperatur 60°C – Schonwaschgang	 MD	Medizinisches Gerät
	Nur Sauerstoff / chlorfreies Bleichmittel erlaubt		Entspricht den EU-Richtlinien für Medizinprodukte
 I	Leinentrocknung		Entspricht der britischen Richtlinie für Medizinprodukte
	Nicht bügeln		
	Nicht chemisch reinigen		

Hergestellt von



APA Parafricta Ltd

30 Upper High Street, Thame, OX9 3EZ, UK

Tel +44 1869 226566

info@parafricta.com

www.parafricta.com

APA Parafricta® Ltd ist ein eingetragener Gerätehersteller bei der britischen MHRA. Das Unternehmen ist auch auf der EUDAMED-Datenbank für Medizingerätehersteller der EU eingetragen.

Fasergehalt der Unterwäsche

PFFUG-001 - Velcro®-Verschluss – Slip stil

Obermaterial/Futter: 100 % Nylon

Besatz: 80 % Nylon, 20 % Elasthan

Zwickel: 100 % Baumwolle

Gummiband : 83 % Nylon, 17 % Elasthan

Latexfrei



PFFUG-002 "Pull-on"- Slip stil

Obermaterial/Futter: 100 % Nylon

Besatz: 80 % Nylon, 20 % Elasthan

Zwickel: 100 % Baumwolle

Gummiband: 83 % Nylon, 17 % Elasthan

Latexfrei



PFFUG-003 "Pull-on"- Boxershorts stil

Obermaterial/Futter: 100 % Nylon

Gummiband: 83 % Nylon, 17 % Elasthan

Latexfrei



Bevollmächtigter EU-Vertreter



European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd

Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC, IRLAND

info@europeandevicesolutions.eu

Importeur



Hospidex nv

Grijpenlaan 23, 3300 Tienen, BELGIEN

info@hospidex.eu